

Instrukcija šļirces lietošanai*


1. solis. Sagatavojiet

A. Izņemiet paplāti ar pilnšļirci no iepakojuma un sagādājiet injekcijai nepieciešamos piederumus.


Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Novietojiet spirta salvetes, vates vai marles tamponu, plāksteri un atkritumu konteineri (nav iekļauts).

B. Atveriet paplāti, noplēšot apvalku. Lai izņemtu pilnšļirci no paplātes, satveriet to drošības aizsarga vietā.

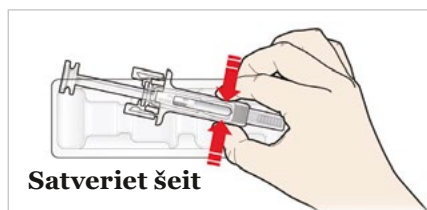

C. Vizuāli pārbaudiet zāles un pilnšļirci. Ja pilnšļirces saturs ir duļķains vai pilnšļirce ir bojāta, neizmantojiet to!

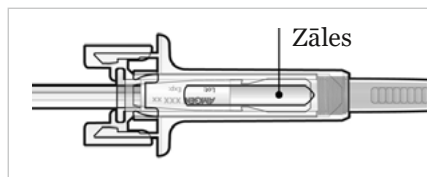


2. solis. Sagatavojieties

A. Rūpīgi nomazgājiet rokas. Sagatavojiet un notīriet injekcijas vietu.

Jūs varat izmantot:


- augšstilba augšpusi;
- vēderu, izņemot 5 cm joslu ap nabu;
- augšdelma ārpusi (tikai tad, ja kāds cits veic jums injekciju).

Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Ļaujiet ādai nožūt.

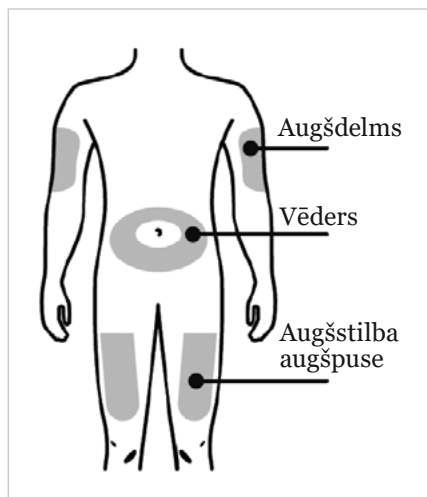


! **Neinjicējiet** vietās, kur āda ir maiga, ar asinsizplūdumu, apsārtumu vai cieta. Izvairieties no injicēšanas vietās ar rētu vai striju zīmēm.

B. Rūpīgi novelciet pelēko adatas uzgali taisnā virzienā un prom no sava ķermeņa.

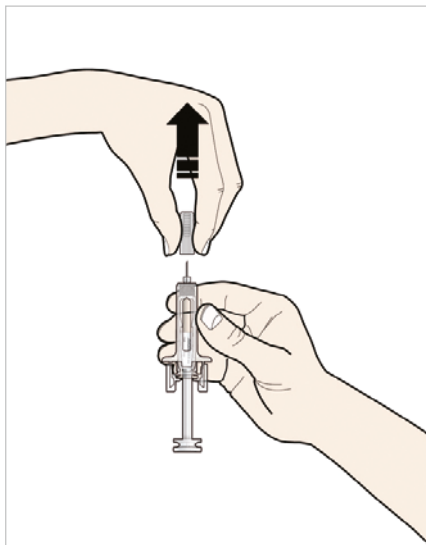


C. Satveriet injekcijas vietu, lai izveidotu stingru virsmu.

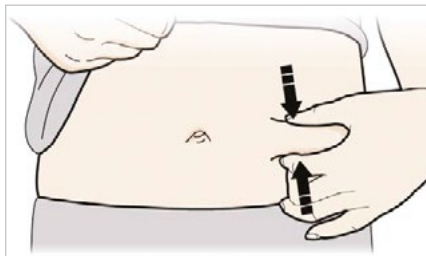

! Injicēšanas laikā ir svarīgi saglabāt satvertu ādu.

3. solis. Injicējiet

A. Turiet satvērumu. **IEDURIET** adatu ādā.

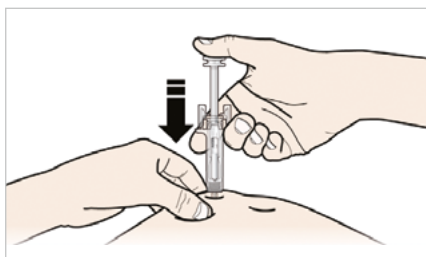

B. Lēni, ar pastāvīgu spiedienu **SPIEDIET** virzuli, līdz sajūtat vai


izdzirdat «klikšķi». Klikšķa laikā turpiniet spiest uz leju.



! Ir svarīgi «klikšķa» laikā spiest uz leju, lai ievadītu pilnu devu.


C. **NOŅEMIET** iekšķī. Tad **PACELIET** šļirci virs ādas.

Pēc virzuļa atbrīvošanas pilnšļirces drošības aizsargs droši pārklās injekcijas adatu.

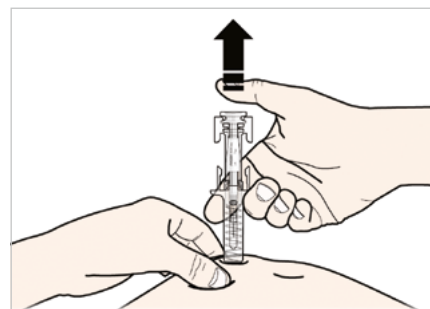

4. solis. Pabeidziet

A. Izmetiet izmantoto pilnšļirci un citus piederumus asiem priekšmetiem paredzētā atkritumu konteinerā.

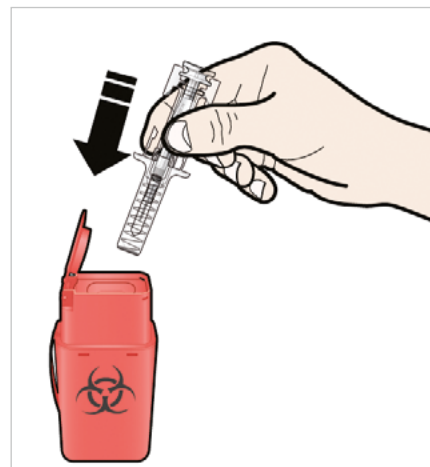

B. Apskatiet injekcijas vietu. Ja tur ir asinis, piespiediet injekcijas vietai vates vai marles tamponu. **Neberzējiet** injekcijas vietu. Ja nepieciešams, uzlieciet plāksteri.

*Raksts sagatavots pēc Amgen materiāliem