



# Instrukcija šļirces lietošanai\*

## Informācija par pilnšļirces sastāvdaļām

### Pirms izmantošanas

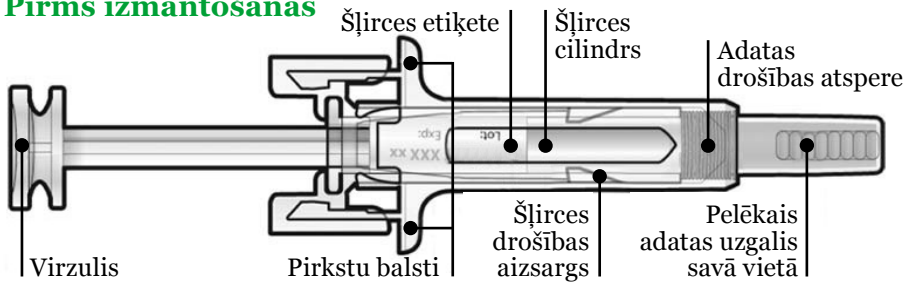

### Pēc izmantošanas

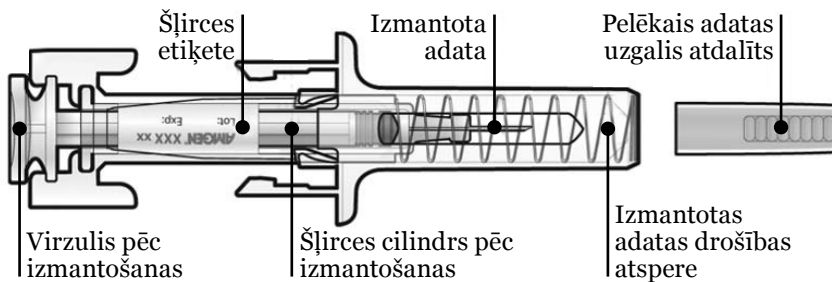

### Svarīgi

#### Pirms izmantojat pilnšļirci ar automātisku adatas aizsargu, izlasiet šo svarīgo informāciju:

- ✗ Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu veikt sev injekciju, ja vien ārsts vai veselības aprūpes speciālists nav Jūs apmācījuši.
- ✗ Ievada injekcijas veidā audos tieši zem ādas (subkutāna injekcija).
- ✗ Izstāstiet savam ārstam, ja Jums ir alerģija pret lateksu. Pilnšļirces adatas uzgalis satur lateksa atvasinājumu un var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.
- ✗ **Nenoņemiet** pelēko adatas uzgali no pilnšļirces, līdz esat gatavs veikt injekciju.
- ✗ **Nelietojiet** pilnšļirci, ja tā ir nokritusi uz cietas virsmas. Izmantojiet jaunu pilnšļirci un sazinieties ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.
- ✗ **Nemēģiniet** aktivizēt pilnšļirci pirms injekcijas.
- ✗ **Nemēģiniet** izņemt caurspīdīgo pilnšļirces aizsargu no pilnšļirces.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

#### 1. solis. Sagatavojiet

**A.** Izņemiet paplāti ar pilnšļirci no iepakojuma un sagādājiet injekcijai nepieciešamos piederumus.

Pirms injicēšanas patīkamākai injekcijai atstājiet pilnšļirci apmēram 30 minūtes istabas temperatūrā. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Nolieciet jauno pilnšļirci uz tīras, labi apgaismotas darba virsmas. Novietojiet spirta salvetes, vates vai marles tamponu, plāksteri un atkritumu konteineri (nav iekļauts).

- ✗ **Nemēģiniet** sasildīt šļirci, izmantojot siltuma avotu, piemēram, karstu ūdeni vai mikroviļņu krāsni.
- ✗ **Neatstājiet** pilnšļirci tiešos saules staros.
- ✗ **Nekratiet** pilnšļirci.
- ✗ **Uzglabājiet pilnšļirces bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.**

**B.** Atveriet paplāti, noplēšot apvalku. Lai izņemtu pilnšļirci no paplātes, satveriet to drošības aizsarga vietā.

Drošības nolūkā:

- ✗ **Neaizskariet** virzuli.
- ✗ **Neaizskariet** pelēko adatas uzgali.

**C.** Vizuāli pārbaudiet zāles un pilnšļirci.

✗ **Neizmantojiet** pilnšļirci, ja:

- zāles ir duļķainas vai tajās ir cietas daļiņas. Tām jābūt dzidram, bezkrāsainam vai iedzeltenam šķīdumam;
- kāda tās daļa ir ieplaisājusi vai salūzusi;
- nav pelēkā adatas uzgaļa vai tas nav stingri pievienots;
- pagājusi uz etiķetes norādītā derīguma termiņa mēneša pēdējā diena.

Visos gadījumos sazinieties ar ārstu vai veselības aprūpes speciālistu.

#### 2. solis. Sagatavojieties

**A.** Rūpīgi nomazgājiet rokas. Sagatavojiet un notīriet injekcijas vietu.

**Jūs varat izmantot:**

- augšstilba augšpusi;
- vēderu, izņemot 5 cm (2 collas) joslu ap nabu;
- augšdelma ārpusi (tikai tad, ja kāds cits veic Jums injekciju).

Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Ļaujiet ādai nožūt.

✗ **Nepieskarieties** injekcijas vietai pirms injicēšanas.

! **Neinjicējiet** vietās, kur āda ir maiga, ar asinsizplūdumu, apsārtumu vai cieta. Izvairieties no injicēšanas vietās ar rētu vai striju zīmēm.

**B.** Rūpīgi novelciet pelēko adatas uzgali taisnā virzienā un prom no sava ķermeņa.

**C.** Satveriet injekcijas vietu, lai izveidotu stingru virsmu.

! Injicēšanas laikā ir svarīgi saglabāt satvertu ādu.

### 3. solis. Injicējiet

**A.** Turiet satvērumu. IEDURIET adatu ādā.

✗ **Nepieskarieties** notīrītajai ādas zonai.

**B.** Lēni, ar pastāvīgu spiedienu SPIEDIET virzuli, līdz sajūtat vai izdzirdat «klikšķi». Klikšķa laikā turpiniet spiest uz leju.

! Ir svarīgi «klikšķa» laikā spiest uz leju, lai ievadītu pilnu devu.

**C.** **NOŅEMIET** ikšķi. Tad **PACELIET** šļirci virs ādas.

Pēc virzuļa atbrīvošanas pilnšļirces drošības aizsargs droši pārklās injekcijas adatu.

✗ **Nelieciet** atpakaļ pelēko adatas uzgali uz izmantotajām pilnšļircēm.

### 4. solis. Pabeidziet

**A.** Izmetiet izmantoto pilnšļirci un citus piederumus asiem priekšmetiem paredzētā atkritumu konteinerā.

Izmetiet izmantoto pilnšļirci un pelēko adatas uzgali asiem priekšmetiem paredzētā atkritumu konteinerā. Zāles jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Uzglabājiet šļirces un atkritumu konteineru bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

✗ **Nelietojiet** pilnšļirci atkārtoti.

✗ **Nepārstrādājiet** pilnšļirces un **neizmetiet** tās sadzīves atkritumos.

**B.** Apskatiet injekcijas vietu. Ja tur ir asinis, piespiediet injekcijas vietai vates vai marles tamponu. **Neberzējiet** injekcijas vietu. Ja nepieciešams, uzlieciet plāksteri.

\*Raksts sagatavots pēc Amgen materiāliem

