



Инструкция по применению*

Информация о составных частях шприц-ручки

До использования

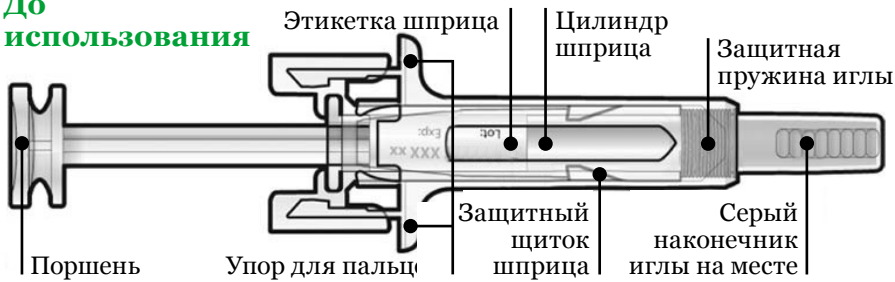

После использования

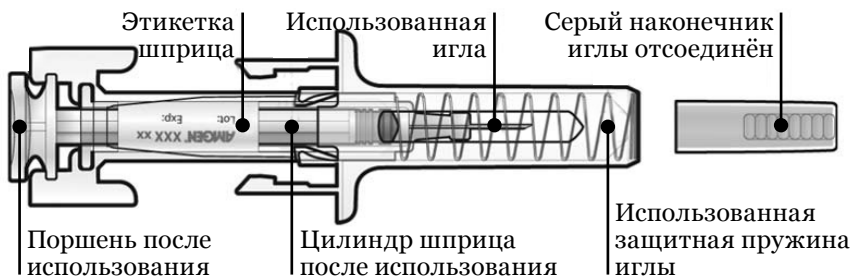

Важно

Перед применением шприц-ручки с автоматической защитой иглы прочтите эту важную информацию:

- ✗ Важно, чтобы Вы не пытались сделать себе инъекцию, если врач или медицинский работник не обучил Вас.
- ✗ Вводится в виде инъекции прямо под кожу (субкутанная инъекция).
- ✗ Уведомите своего врача, если у Вас аллергия на латекс. Колпачок иглы шприц-ручки содержит производные латекса и может вызвать тяжёлые аллергические реакции.
- ✗ Не снимайте серый колпачок с иглы, пока Вы не готовы сделать инъекцию.
- ✗ Не используйте шприц-ручку, если она упала на твёрдую поверхность. Используйте новую шприц-ручку и свяжитесь с врачом или медицинским работником.
- ✗ Не пытайтесь вынуть прозрачный щиток из шприц-ручки.

В случае неясностей свяжитесь с врачом или медицинским работником.

1. -й шаг. Подготовьте

A. Выньте упаковку со шприц-ручкой и подготовьте принадлежности, необходимые для инъекции.

Для более приятной инъекции оставьте шприц-ручку при комнатной температуре в течение около 30 минут перед инъекцией. Тщательно вымойте руки водой с мылом.

Положите новую шприц-ручку на чистую, хорошо освещённую рабочую поверхность. Поместите спиртовые ватные диски, ватный или марлевый тампон, пластырь и контейнер для отходов (не включён).

- ✗ **Не пытайтесь** согреть шприц с помощью источника тепла, например, горячей воды или микроволновой печи.

- ✗ **Не оставляйте** шприц-ручку под прямыми солнечными лучами.
- ✗ **Не трясите** шприц-ручку.
- ✗ **Храните шприц-ручки в недоступных и невидимых для детей местах.**

B. Откройте упаковку, сорвав оболочку. Чтобы вынуть шприц-ручку из упаковки, возьмите её за защитный щиток.

В целях безопасности:

- ✗ **Не дотрагивайтесь** до поршня.
- ✗ **Не дотрагивайтесь** до серого наконечника иглы.

C. Визуально проверьте лекарство и шприц-ручку.

- ✗ **Не используйте** шприц-ручку, если:
 - лекарство мутное или содержит твёрдые частицы. Оно должно выглядеть как прозрачная, бесцветная или желтоватая жидкость;
 - какая-либо часть потрескалась или сломалась;
 - отсутствует или неплотно присоединён серый наконечник иглы;
 - прошёл последний день месяца срока хранения, указанного на этикетке.

Во всех случаях свяжитесь с врачом или медицинским работником.

2. -й шаг. Подготовьтесь

A. Тщательно вымойте руки. Подготовьте и протрите место инъекции.

Вы можете использовать:

- верхнюю часть бедра;
- живот, за исключением зоны в 5 см (2 дюйма) вокруг пупка;
- внешнюю часть плеча (только если инъекцию Вам делает кто-то другой).

Протрите место инъекции спиртовой салфеткой. Дайте коже высохнуть.

✗ **Не прикасайтесь** к месту инъекции перед инъекцией.

! **Не делайте инъекции** в места, где кожа нежная, с кровоизлияниями, покраснениями, или грубая. Избегайте инъекций в рубцы или стрии.

В. Осторожно снимите серый наконечник иглы прямо, в направлении от тела.

С. Захватите место инъекции, чтобы образовать жёсткую поверхность.

! Во время инъекирования важно сохранить кожу сжатой.

3. -й шаг. Инъецируйте

А. Держите складку кожи. **ВОТКНИТЕ** иглу в кожу.

✗ **Не прикасайтесь** к очищенной зоне кожи.

В. Медленно, с постоянным давлением **НАДАВЛИВАЙТЕ** на поршень, пока не почувствуете или не услышите щелчок. Во время щелчка продолжайте надавливать вниз.

! Во время щелчка важно надавливать вниз, чтобы ввести всю дозу.

С. **УБЕРИТЕ** большой палец. Затем **ПОДНИМИТЕ** шприц над кожей.

После освобождения поршня защитный щиток шприц-ручки безопасно накроет место инъекции.

✗ **Не надевайте** серый наконечник иглы на использованные шприц-ручки.

4. -й шаг. Закончите

А. Выбросьте использованную шприц-ручку и другие принадлежности в контейнер для отходов, предназначенный для острых предметов.

Выбросьте использованную шприц-ручку и серый наконечник для иглы в контейнер для отходов, предназначенный для острых предметов. Лекарство нужно утилизировать в соответствии с местными требованиями. Спросите фармацевта, как выбросить лекарства, которые Вы больше не принимаете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

Храните шприцы и контейнер для отходов в недоступном и невидимом для детей месте.

✗ **Не используйте** шприц-ручку повторно.

✗ **Не перерабатывайте** шприц-ручки и **не выбрасывайте** их в бытовые отходы.

В. Осмотрите место инъекции. Если там кровь, прижмите к месту инъекции ватный или марлевый тампон. **Не трите** место инъекции. Если необходимо, наложите пластырь.

*Статья подготовлена по материалам Amgen

