

Инструкция по применению*

1. -й шаг. Подготовьте

А. Выньте упаковку со шприц-ручкой и подготовьте принадлежности, необходимые для инъекции.


Тщательно вымойте руки водой с мылом.

Поместите спиртовые салфетки, ватный или марлевый тампон, пластырь и контейнер для отходов (не включён).

В. Откройте упаковку, сорвав оболочку. Чтобы вынуть шприц-ручку из упаковки, возьмите её за защитный щиток.



С. Визуально проверьте лекарство и шприц-ручку. Если содержание шприц-ручки мутное или шприц-ручка повреждена, не используйте её!

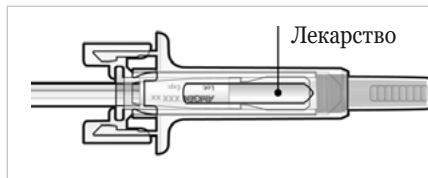


2. -й шаг. Подготовьтесь

А. Тщательно вымойте руки. Подготовьте и протрите место инъекции.

Вы можете использовать:


- верхнюю часть бедра;
- живот, за исключением зоны в 5 см (2 дюйма) вокруг пупка;
- внешнюю часть плеча (только если инъекцию Вам делает кто-то другой).

Протрите место инъекции спиртовой салфеткой. Дайте коже высохнуть.

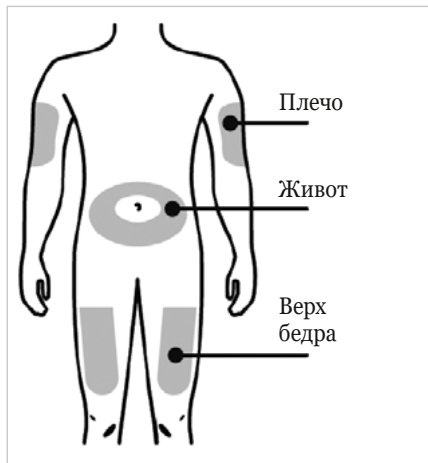


! Не делайте инъекции в места, где кожа нежная, с кровоизлияниями, покраснениями, или грубая. Избегайте инъекций в рубцы или стрии.

В. Осторожно снимите серый наконечник иглы прямо, в направлении от тела.

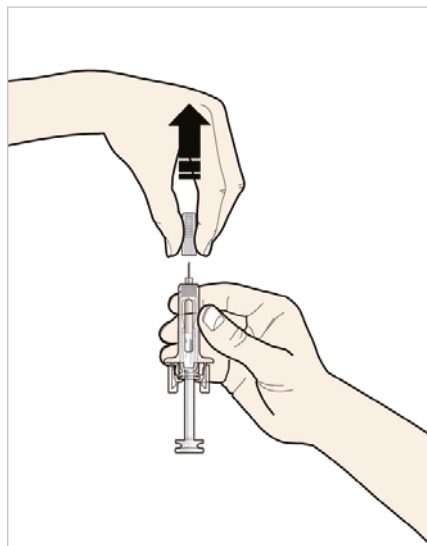


С. Захватите место инъекции, чтобы образовать жёсткую поверхность.

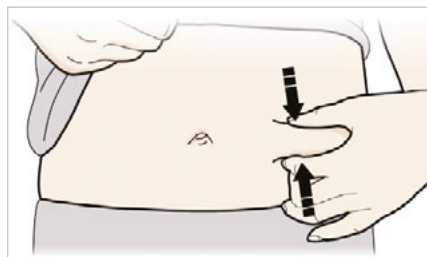

! Во время инъектирования важно сохранить кожу сжатой.

3. -й шаг. Инъецируйте

А. Держите складку кожи. **ВОТКНИТЕ** иглу в кожу.

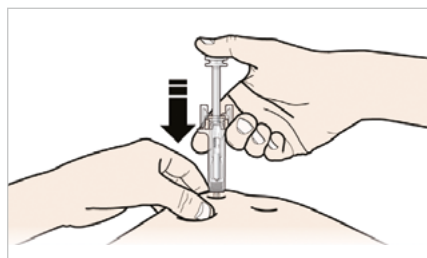

В. Медленно, с постоянным давлением **НАДАВЛИВАЙТЕ** на поршень, пока не почувствуете или не услышите щелчок.


Во время щелчка продолжайте надавливать вниз.



! Во время щелчка важно надавливать вниз, чтобы ввести всю дозу.

С. **УБЕРИТЕ** большой палец. Затем **ПОДНИМИТЕ** шприц над кожей.

После освобождения поршня защитный щиток шприц-ручки безопасно накроет место инъекции.

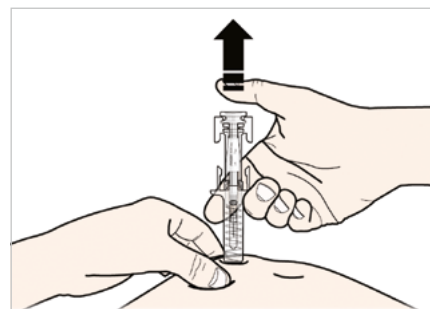

4. -й шаг. Закончите

А. Выбросьте использованную шприц-ручку и другие принадлежности в контейнер для отходов, предназначенный для острых предметов.



В. Осмотрите место инъекции. Если там кровь, прижмите к месту инъекции ватный или марлевый тампон. **Не трите** место инъекции. Если необходимо, наложите пластырь.

*Статья подготовлена по материалам Amgen